

# REVEASOL<sup>®</sup>

## krem

### Wyrób medyczny

---

Instrukcja stosowania – należy uważnie przeczytać

Przed rozpoczęciem stosowania kremu Reveasol<sup>®</sup> należy uważnie przeczytać niniejsze informacje.

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ TEJ ULOTKI! Zawiera ona istotne informacje. W przypadku pytań dotyczących kremu Reveasol<sup>®</sup> należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub do Egis Pharmaceuticals PLC

#### 1. Co to jest Reveasol<sup>®</sup> i kiedy się go stosuje

Reveasol<sup>®</sup> jest wyrobem medycznym. Jest to niezawierający steroidów krem w kolorze prawie białym przeznaczony do leczenia objawów łuszczycy i zapalenia skóry oraz zapobiegania ich wystąpieniu.

Reveasol<sup>®</sup> zawiera Ectoin<sup>®</sup> (ektoinę), naturalną substancję chroniącą komórki o właściwościach łagodzących stany zapalne i stabilizujących błonę komórkową.

Reveasol<sup>®</sup> pomaga w naturalnej eliminacji martwych komórek z powierzchni skóry, zmniejszając szorstkość i zmiękczając skórę w obszarach ognisk chorobowych. Ponadto redukuje łuszczenie, świąd i zaczerwienienie skóry. Reveasol<sup>®</sup> stabilizuje barierę skóry i pomaga unormować wytwarzanie komórek oraz czas dojrzewania skóry. Krem nawilża skórę i chroni przed dalszym odwodnieniem.

Reveasol<sup>®</sup> przynosi ulgę i koi podrażnioną i uszkodzoną skórę, łagodząc reakcje zapalne i wspierając proces regeneracji.

#### 2. Ostrzeżenia i przeciwwskazania

- Nie stosować w miejscach zakażeń skóry.
- **Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.**

- Nie używać przez okres dłuższy niż 6 miesięcy po otwarciu.
- Krem nie powinien być stosowany u osób z nadwrażliwością na Ectoin<sup>®</sup> lub jakikolwiek inny składnik kremu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy natychmiast zaprzestać stosowania.
- Produkt powinien być używany tylko przez jedną osobę.
- Produkt należy stosować jedynie miejscowo na skórę.

#### 3. Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem stosowania kremu Reveasol<sup>®</sup>

Nie istnieją dostępne dane dotyczące interakcji kremu Reveasol<sup>®</sup> z innymi kremami, dlatego też stosowanie go wraz z innymi kremami w tym samym czasie nie jest zalecane.

#### 4. Jak stosować Reveasol<sup>®</sup>

Zawsze stosować Reveasol<sup>®</sup> zgodnie z niniejszą instrukcją stosowania. O ile lekarz nie zalecił inaczej, Reveasol<sup>®</sup> należy delikatnie wmasowywać trzy razy dziennie lub tak często, jak potrzeba w miejsca na skórze chorobowo zmienione.

Jeśli w okresie leczenia nastąpi pogorszenie stanu skóry lub nie będzie widoczna poprawa nawet po długotrwałej terapii, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

#### 5. Możliwe skutki uboczne stosowania kremu Reveasol<sup>®</sup>

Reveasol<sup>®</sup> jest dobrze tolerowany. Do chwili obecnej nieznanne są regularnie występujące lub utrzymujące się skutki uboczne.

W pojedynczych przypadkach może pojawić się pewne krótkotrwałe, miejscowe uczucie pieczenia, zaczerwienienie lub świąd.

W przypadku zauważenia skutków ubocznych związanych ze stosowaniem kremu Reveasol<sup>®</sup>, należy poinformować o tym lekarza, farmaceutę lub dystrybutora produktu.

Jeśli takie objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia lub farmaceutą.

## 6. Jak przechowywać Reveasol®

Data ważności kremu Reveasol® znajduje się na pudełku, jak również na tubce kremu. Kremu Reveasol® nie wolno stosować po upływie daty ważności. Reveasol® należy przechowywać w temperaturze od 2 °C do 25 °C.

## 7. Dodatkowe informacje

Obecnie nie istnieją dostępne dane dotyczące stosowania kremu Reveasol® u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania tego wyrobu medycznego, jeśli:

- pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;
- pacjentka nie jest pewna, czy jest w ciąży, czy też nie

Reveasol® nadaje się do długotrwałego leczenia/codziennego stosowania oraz do wrażliwej skóry. Nie zawiera barwników, substancji zapachowych oraz konserwujących.

Reveasol® jest odpowiedni do stosowania u noworodków i dzieci.

Dzieciom i pacjentom niezdolnym do samodzielnego stosowania kremu Reveasol® należy zapewnić pomoc podczas aplikacji kremu Reveasol®.

## 8. Zawartość opakowania kremu Reveasol®

tubka aluminiowa 30 ml

## Składniki

Ectoin®, woda, alkohol cetearylowy, mocznik, izononanian cetearylu, gliceryna, olej z nasion simondsji kalifornijskiej (*Simmondsia Chinensis*), uwodnorniony polidecenen, glikol pentylenowy, hydroksyetylomocznik,

pantenol, glukozyd cetearylowy, lecytyna, alantoina, guma ksantanowa, etyloheksylogliceryna, mleczan sodu, siarczan cetearylu sodu, triacetyna.

## 9. Podmiot odpowiedzialny / wytwórca



bitop AG  
Stockumer Str. 28,  
58453 Witten, Niemcy

## Dystrybutor

Egis Pharmaceuticals PLC  
Keresztúri út 30-38.,  
1106 Budapeszt, Węgry

Wszelkie incydenty medyczne związane z stosowaniem produktu należy zgłaszać na adres: [help@egis.hu](mailto:help@egis.hu)

## 10. Data sporządzenia instrukcji:

15.04.2021

	Znak CE z numerem jednostki notyfikowanej
	Wytwórca
 / EXP	Kod partii
	Użyć przed (data ważności) lub EXP
	Sprawdź w instrukcji użytkownika
 2 °C - 25 °C	Zakres temperatur
	Okres stosowania po otwarciu

PL-11